

ReSkin® Bike Patch リースキンバイクパッチ

サイクリングしているあなたを守る


乗車時にサイクリングシューズとの擦れによる痛みはサイクリストにとって共通の悩みです。これはプロ選手のパフォーマンスに深刻な影響を与えることもあります。もしこの問題を予防できれば、パフォーマンスは断然良くなることでしょう。決してプロ選手だけではなくアマチュアの方にも同様の効果をもたらします。

ReSkin®はBio-Racer社が開発した画期的な商品で、サドル部分で生じる摩擦による痛みを防止して解決します。ミシン目のあるLycra®とシリコンコーティングが融合することで、肌に優しくクオリティの高い商品となっています。ReSkin®は販売前に研究施設等で広範囲に及ぶテストを実施しています。肌に優しく、はがす際の痛みもなく、洗濯して再び使用することも出来ます。ワールドクラスのサイクリストたちが既にReSkin®を愛用し素晴らしい成功を収めています。もちろんアマチュアの選手にも役立ちます!

- ・ ReSkin®は会陰に貼り付けて使用します。会陰とは性器と肛門の間にある皮膚です。会陰付近には汗腺、毛嚢そして皮脂腺があり、摩擦が炎症や感染症の原因となる場合があります。
- ・ 女性がご使用される場合は快適にお使いいただくために点線に沿ってReSkin®を切った後のご使用をお勧めいたします。

使用方法

- 1: 裏紙を粘着力のある面から剥がします。女性の場合は、まずハサミで裏紙の点線に沿って切ります。
- 2: 粘着力のある面を上にし、指先に乗せます。
- 3: 会陰の下にReSkin®をもっていく(会陰とは性器と肛門の間にある皮膚です)。女性の場合、ReSkin®は縦にしても横にしてもお好みでご使用できます。
- 4: ReSkin®を会陰に貼り付けます。
- 5: ReSkin®の残りの部分を擦って足の内側にしっかりと貼り付けます。
- 6: これでReSkin®が摩擦から守ります。

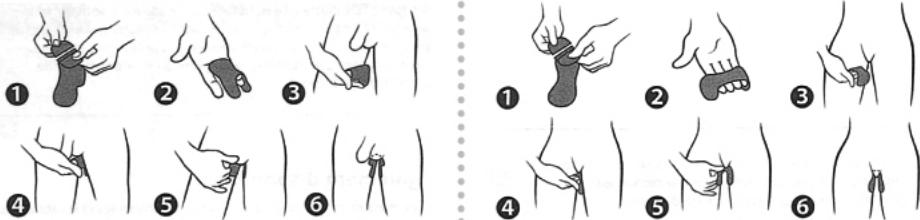

特長:

- ・ ReSkin®は摩擦により問題が起きる肌に直接貼り付けます。清潔で乾いた肌に貼ってください。肌には上手く貼り付けるためにReSkin(r)をお好みの形に切ることもできます。肌が擦れて生じる痛みからReSkin(r)が守ります。
- ・ Bi-Elasticityという二方向に伸びる弾力性が摩擦による痛みから解放します。摩擦はReSkin®と衣服などの間で起きるので、肌を摩擦から守ります。Re-Skinはまるで人工的な皮膚のような役割をしますと言えます。
- ・ ReSkin®は通気性がよく、肌に優しく、はがす際に痛みがありません。特殊に開発された粘着面は一本の毛を抜いてしまうこともほとんど無いくらいです。ご使用前には装着する場所の毛を剃ることをお勧めします。
- ・ ReSkin®表面に使用されている特殊な粘着物はISO 10993-1規格に適合しています。また、細胞障害性・皮膚感受性・皮内反応のテストを通過しています。

使用上の注意:

ReSkin®は外用品です。お子様の手の届かない所で保管ください。痛みや不快感がありましたら、直ぐに使用をお止め下さい。使用中止後、痛みや不快感が続くようでしたら医師に相談してください。糖尿病、血液循環に問題を抱えている方は使用前に医師にご相談ください。肌に傷がある際にはご使用しないでください。

洗濯、再使用に関して: ご使用状況にもよりますが、Re-Skinは3~5回にわたり使用することが出来ます。運動後にシャワーを浴びる際、タオルやその他の滑らかな場所にReSkin®を貼り付けてください。シャワーを使って、ぬるま湯ですすぎ洗いを行なってください。石鹸を使う場合はマイルドソープをご使用ください。きれいになりましたら乾燥させます。感想した後、再び使用することができます。

コツ: ラップを裏紙として使用して保管してください。

ライトウェイプロダクツジャパン株式会社
〒171-0022 東京都豊島区南池袋3-18-34 池袋シティハイツ102
TEL 03-5950-6002 FAX 03-5956-8028
<http://www.riteway-jp.com>